


商品名

トイレ用アーム SY-21

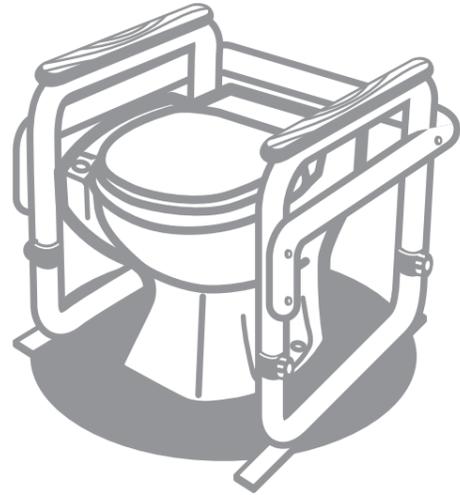

組立説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。組立を始める前にこの組立説明書をよくお読みください。不適切な組立方法や使用は、破損やけがの原因にもなりますので、必ず指示に従って正しく組立、ご使用ください。また本書は組立終了後もいつでも取り出してご覧いただけるように、必ず保管してください。


商品コード	SY-21
サイズ	外寸
	約 幅63.5×奥行62.5×高さ61.0～73.0(cm)
	内寸
	約 幅49.5×奥行60.0×高さ61.0～73.0(cm)
材質	パイプ：スチールパイプ 手すり：天然木（パイン材） 調節つまみ：ポリプロピレン・ABS樹脂
	両面テープ：ウレタン キャップ：ポリエチレン
原産国	日本



株式会社 ビーワーススタイル
〒955-0004 新潟県三条市須戸新田1213番地
mail:info@beworthy.jp tel:0256-47-1867
受付時間 / 9：00～18：00（土・日・祝日を除く）
www.beworthy.jp

部品・付属部品の確認

① サイドフレーム上部

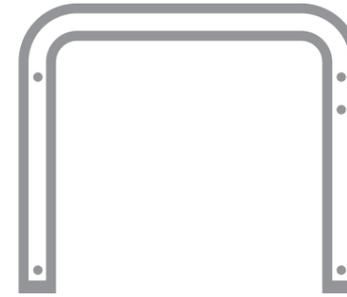


× 2




くぼみ拡大写真

② サイドフレーム下部

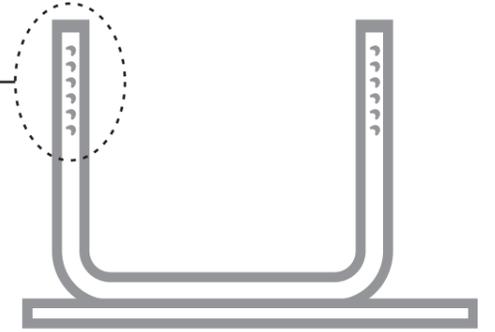

× 2

③ 補強フレーム

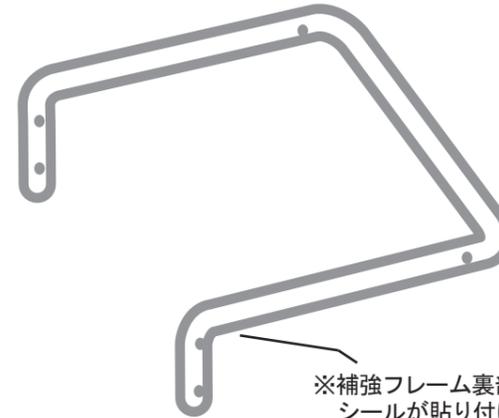


※補強フレーム裏部分にシリアルナンバーシールが貼り付けてあります。

○数字○

× 1

④ 手すり

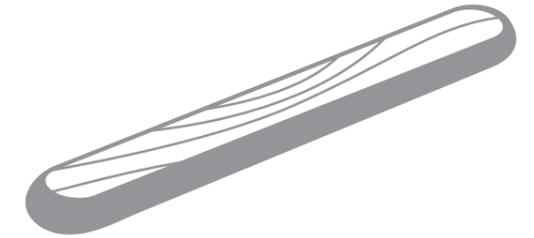

× 2

⚠ 使用上の注意

組立・設置

転倒・けが・破損の原因

- 床が平らな場所でご使用ください。傾いた場所や凸凹のある場所で使用しますと転倒する危険があります。

■ お願い

- 天災等の不可抗力や不平等な修理・改造による故障・破損等は保障しかねます。
- 破棄の場合は、お住まいの市町村等の注意に従って正しい破棄の方法をお守りください。

■ お手入れ・点検

- 定期的に各部（ネジ・接合部等）の点検を行ってください。（1カ月に1度が目安です）

使用

転倒・けが・破損・変形の原因

- この商品本来の目的以外の使用は絶対に行わないでください。誤った使用は破損やけがの原因になります。
- 両側ひじかけ部分を外側方向に強い力を加えないでください。変形、破損することがあります。
- 商品に乗ったりしないでください。けがをする恐れがあります。特にお子様には十分注意してください。
- 片寄った荷重はかけないでください。
- トイレのサイズや形状によっては、設置できない場合もございます。

⚠ 組立時の注意


- ネジに合ったドライバー・手袋等を用意してください。




- パイプの中に指を入れないでください。怪我の原因になります。



- 組立時は床・家具等にキズがつかないように十分な空間と床に布やカーペットの敷いてある所でしてください。

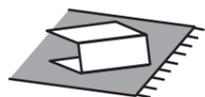


- ネジを仮止めし、あとからしっかり締め直してください。

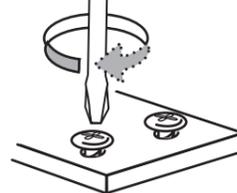

- 最初からきつく締め付けますと、組み立てられなくなる場合がございます。

- 組立は二人以上で行ってください。

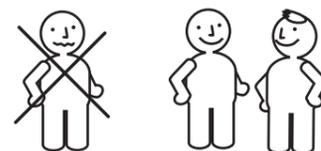

Ⓐ ネジ



× 10

Ⓑ 調節つまみ



× 4

Ⓒ ウレタン両面テープ



× 2